



INSTITUUT VOOR KUNSTOGEN  
**F. AD. MÜLLER SÖHNE**

## HET KUNSTOOG



Advies voor  
**DE BEHANDELING  
VAN KUNSTOGEN**

### CONTACT

F. AD. MÜLLER SÖHNE  
Instituut voor kunstogen

Postbus 1055  
1400 BB Bussum

Telefoon: 035 - 695 03 84  
Telefax: 035 - 695 03 94

Internet: [www.muellersoehne.com](http://www.muellersoehne.com)  
E-Mail: [info@muellersoehne.com](mailto:info@muellersoehne.com)

[www.muellersoehne.com](http://www.muellersoehne.com)



## INZETTEN VAN DE OOGPROTHESE

Let op: om te voorkomen dat uw kunst oog beschadigt, dient het inzetten en uitnemen van kunstogen te geschieden boven een zachte ondergrond (bijv. handdoek). Voordat de prothese ingezet wordt, dient deze grondig gereinigd te worden. Maak het kunst oog in ieder geval eerst een beetje vochtig om het inzetten te vergemakkelijken. Let op: bij normale prothesen wijst het korte deel naar de neus. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn, omdat veel prothesen in hun vormgeving van dit schema afwijken.



### INZETTEN

Het inzetten geschiedt door de prothese eerst onder het naar voren getrokken bovenlid te schuiven en hem dan in deze positie vast te houden.

Het licht naar voren trekken van het onderlid zorgt ervoor, dat het kunst oog in zijn definitieve positie achter het onderlid glijdt.

Eventueel raden wij aan om de positie van uw prothese te corrigeren door licht met de vinger op het oog te drukken, zodat eventueel meegekomen lucht kan ontsnappen.

## UITNEMEN VAN DE OOGPROTHESE

Denk bij het uitnemen van de prothese ook altijd aan een zachte ondergrond, zodat het kunst oog bij het vallen niet beschadigt wordt. In bijzondere gevallen kan het uitnemen met behulp van een speciaal instrument (haakje of zuiger) noodzakelijk zijn. Uw ocularist kan u hierover individueel adviseren. Let op: als u in het oog wrijft of het afveegt, doe dit dan altijd naar de neus toe. Veegt u in de andere richting – vooral bij het onderlid, dan zou de prothese kunnen verdraaien of eruit gedrukt kunnen worden.

### UITNEMEN

Druk het onderlid zover naar beneden dat de onderrand van de prothese vrij ligt.

Schuif dan het topje van uw wijsvinger onder de onderrand van de prothese en zet de middelvinger op het kunst oog om dit naar beneden toe uit de oogholte te halen.

Eventueel kan het uitnemen ook met de duim en wijsvinger gedaan worden.



## BEHANDELING VAN DE OOGPROTHESE

De prothese dient één maal per dag met helder, lauwwarm water gereinigd te worden. Heet of koud water raden wij dringend af, omdat extreme temperatuurschommelingen het materiaal zouden kunnen beïnvloeden qua houdbaarheid.

## BEWAREN

Draagt u het kunst oog niet. bewaar het dan droog in een gesloten houder. **Let op: het kunst oog mag in principe niet in water bewaard worden!**